

## Gebrauchsanweisung

### REF

252-150	Vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate 30 ml
250-400	Vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate 10 ml
251-400	Vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate 10 ml Breit
253-400	Vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate 3.5 ml
255-400	Vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate 5 ml

### BESCHREIBUNG

Die vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate ist eine Spritze, die mit USP-gereinigtem Wasser vorgefüllt und durch Gammabestrahlung sterilisiert wurde. Die Spritze besteht aus einem Polypropylen-Zylinder und -Kolben sowie aus latexfreiem Gummi (Kolbendichtung und Schutzhülle).

### ANWENDUNGSHINWEISE

Die vorgefüllte sterile Wasserspritze AquaFlate dient zum Füllen eines Foley-Katheterballons.

### GEGENANZEIGEN

Keine bekannt.

### WARNHINWEISE

- Die mit sterilem Wasser vorgefüllte Spritze dient NUR zum Füllen des Katheters und NICHT zur Injektion.
- Die Spritzen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht wiederverwendet oder erneut sterilisiert werden.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bei beschädigter oder geöffneter Verpackung das Produkt nicht verwenden.
- Bei nicht vorhandener Schutzhülle die Spritze nicht verwenden.
- Die Spritzen sind nach einmaligem Gebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Gebrauchsanweisung beachten und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwenden, siehe ANWENDUNGSHINWEISE.
- Die Gebrauchsanweisung zum Foley-Katheter enthält spezifische Anweisungen zum Platzieren und Füllen des Katheters, einschließlich der Auswahl des geeigneten Volumens an sterilem Wasser, das zum Füllen des Katheterballons erforderlich ist.

### PRÜFUNG BEI ERHALT UND VOR GEBRAUCH


Das Produkt ist nach Erhalt und vor Gebrauch gründlich auf Beschädigungen oder Defekte an der Verpackung zu prüfen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Gebrauchsanweisung zum Foley-Katheter sorgfältig lesen und befolgen.
2. Vor Gebrauch die Schutzhülle entfernen und zum Befüllen des Katheterballons die Gebrauchsanweisung zum Foley-Katheter befolgen.
3. Nach Beendigung der Katheterisierung die Spritze ordnungsgemäß entsorgen.

### LAGERUNGSHINWEISE

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um die Produktleistung zu erhalten.
- An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.

 HR HealthCare  
2600 Eastern Blvd., Suite 201  
York, PA 17402 USA  
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, und AquaFlate sind  
Marken oder eingetragene Marken von HR HealthCare.  
© 2020, 2023-2024 HR HealthCare. Alle Rechte vorbehalten.

LBL-0008-DE Rev. 3 (01/2024)