

## Modo de empleo

### REF

252-150	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate 30 ml
250-400	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate 10 ml
251-400	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate 10 ml Ancha
253-400	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate 3.5 ml
255-400	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate 5 ml

### DESCRIPCIÓN

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate contiene de agua depurada mediante láser de pulso ultracorto y esterilizada mediante irradiación gamma. Consta de un tubo y un émbolo de polipropileno. La punta del émbolo y la tapa de la jeringa son de caucho no producido a partir de látex.

### INDICACIONES DE EMPLEO

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate está ideada para inflar el globo del catéter de Foley.

### CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

### ADVERTENCIAS

- La jeringa prellenada de agua estéril está ideada ÚNICAMENTE para el inflado del catéter y NO se debe emplear para inyecciones.
- Las jeringas son monoúso y no se deben reutilizar ni volver a esterilizar.

### PRECAUCIONES

- No utilice el producto si el envase se encuentra dañado o abierto.
- No utilice la jeringa si no viene tapada.
- La jeringa se debe desechar adecuadamente después de usarla una única vez.
- Lea las instrucciones de utilización y guarde la jeringa en un lugar seguro.
- Utilice el producto únicamente para el uso previsto; consulte las INDICACIONES DE EMPLEO.
- En las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley, consulte la forma correcta de colocar el catéter e inflar el globo, así como la selección del volumen adecuado de agua estéril necesaria para inflarlo.

### PREPARATIVOS, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN


El producto debe inspeccionarse a fondo en el momento de la recepción y antes de su utilización, con el fin de asegurarse de que el envase no se encuentra dañado ni presenta defectos.

### MODO DE EMPLEO

1. Lea a fondo y siga las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley.
2. Cuando vaya a utilizar el producto, retire la tapa de la jeringa y siga las instrucciones de uso e inflado del fabricante del catéter.
3. Cuando el catéter se encuentre correctamente colocado, deseche la jeringa de forma adecuada.

### ALMACENAMIENTO

- Para evitar reducir el rendimiento del producto, protegerlo de la luz solar directa.
- Guardar el producto en un lugar limpio y seco.

 HR HealthCare  
2600 Eastern Blvd., Suite 201  
York, PA 17402 USA  
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, y AquaFlate son marcas comerciales o marcas registradas de HR HealthCare.  
© 2020, 2023-2024 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

LBL-0010-ES Rev. 3 (01/2024)