

# HR® Gleitgel

## HR® Gleitgel 2X

de

### Gebrauchsanweisung

#### REF

201	113 g (4 oz.) Flip-Top Tube, steril
203	56.7 g (2 oz.) Flip-Top Tube, steril
205	36 g (1.25 oz.) OneShot® Paket, steril
205ST	36 g (1.25 oz.) OneShot® Paket mit SafeWrap® Paket, steril
206	10 ml vorgefüllte Spritze, steril
207	3 g OneShot® Paket, steril
208	3 g OneShot® Pakets in CarePac® Box, steril
209	5 g OneShot® Paket, steril
210	56.7 g (2 oz.) 2X, Flip-Top Tube, steril
211	36 g (1.25 oz.) 2X, OneShot® Paket, steril

#### BESCHREIBUNG

HR Gleitgel ist wasserlöslich, stabil, nicht fettend und verteilt sich gleichmäßig. Es findet breite Anwendung in Krankenhäusern und Arztpraxen. Ideal, um Gummiprodukte, Rektalthermometer, Rektal- und Vaginalduschen für Kinder und Erwachsene gleitfähig zu machen.

#### INDICATIONS FOR USE

HR Gleitgel ist ein steriles Gel, das den Zugang mit einer diagnostischen oder therapeutischen Vorrichtung in eine Körperöffnung erleichtert, indem es die Reibung zwischen der Vorrichtung und der Körperöffnung verringert; es ist nicht speziell auf einen bestimmten Anatomietyt zugeschnitten.

#### GEGENANZEIGEN

Empfindlichkeit gegenüber Inhaltsstoffen.

#### WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Produkt nicht über das aufgedruckte Verfallsdatum hinaus anwenden, da Sterilität und fehlerfreie Funktion nicht gewährleistet werden können.
- Wiederverwendung von HR Gleitgel (REF-Nr. 205, 205ST, 207, 208, 209, 211) könnte zu Kreuzkontamination, Infektionsrisiken oder unerwünschten Reaktionen für den Patienten führen.
- Ein äußerst geringer Prozentsatz unter Männern und Frauen könnte auf einen oder mehrere Inhaltsstoffe in diesem Gleitmittel empfindlich reagieren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Falls eine Reizung auftritt, die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn die Versiegelung unter der Kappe beschädigt ist oder fehlt (REF-Nr. 201, 203, 210).
- Das Verwenden eines Gleitgels für einen anderen als den ihm zugeordneten Zweck könnte zu einem Risiko für den Patienten oder zu einer nicht zufriedenstellenden Leistung des Produkts führen.

#### VORKONTROLLE, HANDHABUNG UND UNTERSUCHUNG

Das Produkt muss beim Erhalt und vor der Verwendung gründlich untersucht werden, um sicherzustellen, dass die Verpackung nicht beschädigt oder defekt ist. Wird eine Beschädigung oder Auslaufen des Produkts festgestellt, sollte das Produkt weggeworfen werden.

#### STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. **HR Gleitgel OneShot SafeWrap (REF-Nr. 205ST)**
  - a) Außenseite des SafeWrap-Beutels vor dem Einbringen in eine sterile Umgebung desinfizieren.
  - b) Äußeren SafeWrap-Beutel entfernen und die Packung HR Gleitgel auf das sterile Tablett legen.
  - c) Je nach Bedarf eine Portion HR Gleitgel direkt beim Patienten oder auf em Instrument anwenden.

d) Packung nach Gebrauch wegwerfen.

2. **HR Gleitgel OneShot Paket (REF-Nr. 205, 207, 208, 209, 211) und HR Gleitgel Spritze (REF-Nr. 206)**


- a) Je nach Bedarf eine Portion HR Gleitgel direkt beim Patienten oder auf dem Instrument anwenden.
- b) Packung nach Gebrauch wegwerfen.

3. **HR Gleitgel Flip-Top-Tube (REF-Nr. 201, 203, 210)**

- a) Deckel und Spitze vor dem Öffnen desinfizieren. Originalitätssiegel entfernen.
- b) Zum Öffnen Deckel hochklappen.
- c) Je nach Bedarf eine Portion HR® Gleitgel direkt beim Patienten oder auf dem Instrument anwenden.

#### INSTRUMENT ANWENDEN

Bei Raumtemperatur (15°-30°C oder 59°-86°F) an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren.

 HR HealthCare  
2600 Eastern Blvd., Suite 201  
York, PA 17402 USA  
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, HR, OneShot, SafeWrap, and CarePac sind Marken oder eingetragene Marken von HR HealthCare.  
©2008, 2025 HR HealthCare. Alle Rechte vorbehalten.

LBL-0019-DE Rev. 2 (02/2025)

 HR HealthCare