

HR® gel lubricante

HR® gel lubricante 2X

es

Instrucciones de uso

REF

201	113 g (4 oz.) Flip-Top Tube, Estéril
203	56.7 g (2 oz.) Flip-Top Tube, Estéril
205	36 g (1.25 oz.) OneShot® Packet, Estéril
205ST	36 g (1.25 oz.) OneShot® Packet con SafeWrap® Package, Estéril
206	10 ml Pre-filled Syringe, Estéril
207	3 g OneShot® Packet, Estéril
208	3 g OneShot® Packets in CarePac® Box, Estéril
209	5 g OneShot® Packet, Estéril
210	56.7 g (2 oz.) 2X, Flip-Top Tube, Estéril
211	36 g (1.25 oz.) 2X, OneShot® Packet, Estéril

DESCRIPCIÓN

El gel lubricante HR® es un producto soluble en agua, estable y no graso que se extiende de manera uniforme. Es muy utilizado en hospitales y consultorios médicos. Ideal para lubricar productos de goma, termómetros rectales, boquillas rectales y vaginales para niños y adultos.

INDICACIONES DE USO

El gel lubricante HR es un gel estéril destinado a facilitar la entrada de los dispositivos de diagnóstico o tratamiento a través de un orificio corporal, reduciendo la fricción entre ambos. No está previsto para un tipo particular de anatomía.

CONTRAINDICACIONES

Sensibilidad a los ingredientes..

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- No utilice el producto una vez superada la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, ya que su esterilidad y rendimiento no pueden garantizarse.
- La reutilización del gel lubricante HR (n.º de REF 205, 205ST, 207, 208, 209, 211) podría provocar contaminación cruzada, riesgos de infección o reacciones adversas en el paciente.
- Un porcentaje muy reducido de hombres y mujeres puede presentar sensibilidad a uno o más de los ingredientes de este lubricante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de producirse irritación, interrumpa el uso y consulte a un médico.
- No utilice el producto si el envase está dañado o abierto.
- No utilice el producto si el precinto situado bajo el tapón está roto o no se encuentra presente (n.º de REF. 201, 203, 210).
- El uso de geles lubricantes con fines diferentes a aquellos para los que están previstos podría implicar riesgos para el paciente o un rendimiento no satisfactorio.

PREPARACIÓN PARA EL USO, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN

El producto debe someterse a una inspección a fondo en el momento de su recepción y antes de su uso con el fin de garantizar que el envase no esté dañado ni sea defectuoso. Si se identifica algún daño o fuga en el producto, este deberá desecharse.

INSTRUCCIONES DE USO


1. Gel lubricante HR OneShot® SafeWrap (n.º de REF. 205ST)

- Desinfecte el exterior de la bolsa SafeWrap antes de introducirla en un entorno estéril.
- Retire la bolsa externa SafeWrap y coloque el envase con el gel lubricante HR en la bandeja estéril.
- Aplique directamente la cantidad necesaria de gel lubricante HR sobre el paciente o el instrumento.
- Deseche el envase tras el uso.

- Gel lubricante HR OneShot Packet (n.º de REF. 205, 207, 208, 209, 211) y Gel lubricante HR Syringe (n.º de REF. 206)**
 - Aplique directamente la cantidad necesaria de gel lubricante HR sobre el paciente o el instrumento.
 - Deseche el envase tras el uso.
- Tubo con tapa abatible de gel lubricante HR (n.º de REF. 201, 203, 210)**
 - Desinfecte el tapón y la punta antes de abrir. Retire el sello de cierre.
 - Dé la vuelta a la tapa para abrirla.
 - Aplique directamente la cantidad necesaria de gel lubricante HR sobre el paciente o el instrumento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS

- Almacenar en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente (15-30 °C o 59°-86°F).

 HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, HR, OneShot, SafeWrap, y CarePac son marcas comerciales o marcas registradas de HR HealthCare.
©2008, 2025 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

LBL-0021-ES Rev. 2 (02/2025)