

Instrucciones de uso

INDICACIONES DE USO

La finalidad de la sonda de sistema cerrado para sondaje intermitente EZ-Protect™ es drenar orina de la vejiga.


CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

ADVERTENCIAS

- Si al retirar el tapón se retira también la punta introductora, podría aumentar el riesgo de infección urinaria, puesto que la punta se diseñó para proteger la sonda de posibles microbios patógenos.
- Todo incidente grave que se presente en relación con este producto debe informarse al fabricante.

COMPONENTES DE LA SONDA

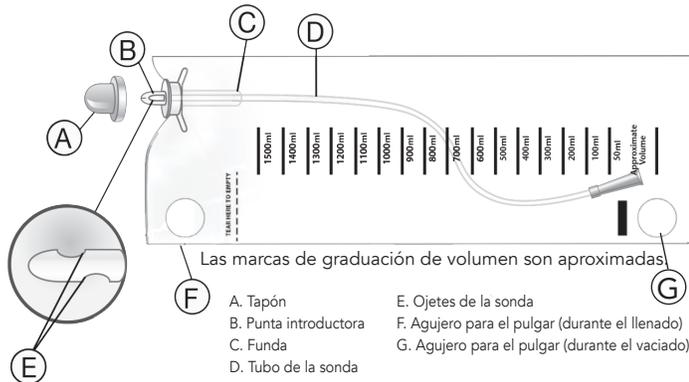


INSTRUCCIONES DETALLADAS INSTRUCCIONES PARA EL HOMBRE

(instrucciones para la mujer al reverso)


1. Lávese las manos. Abra el envase y extraiga su contenido. Póngase los guantes y utilice un paño protector absorbente, si es necesario.




2. Prepare la sonda. Retire el tapón que cubre la punta introductora. Asegúrese de que el tubo de la sonda se encuentre dentro de la punta introductora, pero que no asome por el agujero de la punta. **IMPORTANTE:** Al retirar el tapón, quítelo con movimientos suaves de la punta introductora. No tire de él hacia arriba, ya que podría desprender la punta introductora de la bolsa. Compruebe que la punta introductora esté intacta después de retirar el tapón, y que todavía esté unida a la bolsa. Si la punta introductora se desprendiera al retirar el tapón, deseche el producto completo y utilice otro. No intente introducir la sonda sin que la punta introductora esté unida a la bolsa. Además, tenga cuidado de no tocar la punta introductora con los dedos, para no poner en peligro la asepsia de la técnica.

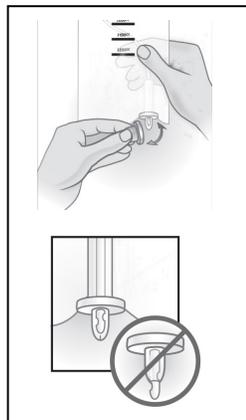

3. Limpie el orificio de la uretra (meato) y la zona que lo rodea.

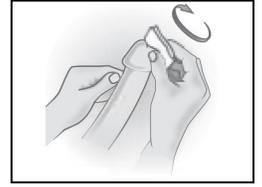


4. Con la mano no dominante, sostenga el pene por debajo del glande (cabeza del pene). Con la mano dominante, ponga la punta introductora y la sonda dentro de la abertura del meato. Luego, sostenga la sonda en su sitio con la mano no dominante. Si la sonda es de punta curva (coudé), lea la nota a continuación; de lo contrario, continúe con el paso 5.

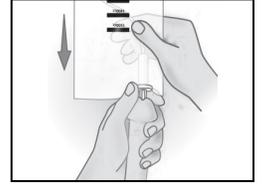


NOTA: Punta curva (coudé): Una línea indicadora de color azul en el tubo de la sonda o una línea en relieve en el lado del embudo coloreado indican la ubicación de la curva de la punta. En la mayoría de los casos, la curva de la punta debe apuntar hacia arriba durante la introducción para que la sonda pase más allá de la próstata. Consulte con el médico o el profesional de la salud que le atiende.



5. Con la mano dominante, agarre el tubo de la sonda a través de la bolsa, aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la funda, y comience a empujar la sonda dentro de la uretra en intervalos de entre 1 pulgada (2.5 cm) y 1.5 pulgadas (5 cm).

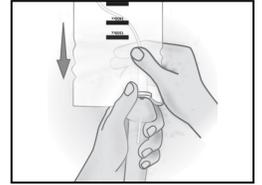

6. Continúe hasta que la sonda llegue a la vejiga y comience a salir orina. Deje que la orina fluya hasta que la vejiga esté vacía o la bolsa esté llena.

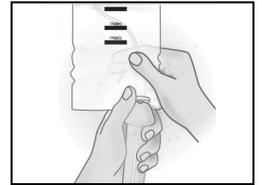

7. Cuando la orina haya dejado de drenar, retire despacio y suavemente la punta introductora y la sonda de la uretra.



8. Para vaciar la bolsa, rasgue por la marca: «TEAR HERE TO EMPTY» [Rasgue aquí para vaciar]. Rasgar hacia abajo da mejores resultados. También puede desechar la orina por la punta introductora. Utilice el agujero para el pulgar situado en la parte inferior y ubique la bolsa para que la orina salga por la punta. Vierta la orina en el inodoro.



9. Deseche la sonda, la bolsa y el contenido según las prácticas clínicas normales y aceptables.




10. Lávese las manos al finalizar.

INSTRUCCIONES PARA LA MUJER

1. Lávese las manos. Abra el envase y extraiga su contenido. Póngase los guantes y utilice un paño protector absorbente, si es necesario.



2. Prepare la sonda. Retire el tapón que cubre la punta introductora. Asegúrese de que el tubo de la sonda se encuentre dentro de la punta introductora, pero que no asome por el agujero de la punta. **IMPORTANTE:** Al retirar el tapón, quítelo con movimientos suaves de la punta introductora. No tire de él hacia arriba, ya que podría desprender la punta introductora de la bolsa. Compruebe que la punta introductora esté intacta después de retirar el tapón, y que todavía esté unida a la bolsa. Si la punta introductora se desprendiera al retirar el tapón, deseche el producto completo y utilice otro. No intente introducir la sonda sin que la punta introductora esté unida a la bolsa. Además, tenga cuidado de no tocar la punta introductora con los dedos, para no poner en peligro la asepsia de la técnica.

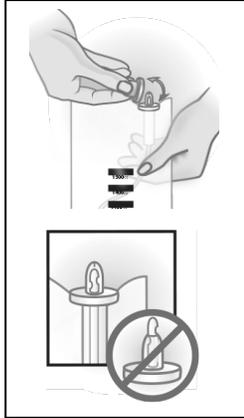

3. Limpie el orificio de la uretra (meato) y la zona que lo rodea.



4. Con la mano no dominante, separe los labios menores de la vulva. Con la mano dominante, ponga la punta introductora y la sonda dentro de la abertura del meato. Luego, sostenga la sonda en su sitio con la mano no dominante.



5. Con la mano dominante, agarre el tubo de la sonda a través de la bolsa, aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la funda, y comience a empujar la sonda dentro de la uretra en intervalos de entre 1 pulgada (2.5 cm) y 1.5 pulgadas (5 cm).



6. Continúe hasta que la sonda llegue a la vejiga y comience a salir orina. Deje que la orina fluya hasta que la vejiga esté vacía o la bolsa esté llena.



7. Cuando la orina haya dejado de drenar, retire despacio y suavemente la punta introductora y la sonda de la uretra.



8. Para vaciar la bolsa, rasgue por la marca: «TEAR HERE TO EMPTY» [Rasgue aquí para vaciar]. Rasgar hacia abajo da mejores resultados. También puede desechar la orina por la punta introductora. Utilice el agujero para el pulgar situado en la parte inferior y ubique la bolsa para que la orina salga por la punta. Vierta la orina en el inodoro.



9. Deseche la sonda, la bolsa y el contenido según las prácticas clínicas normales y aceptables.



10. Lávese las manos al finalizar.



Fabricada por: HR HealthCare
2600 Eastern Boulevard, Suite 201
York, PA 17402 USA • hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, el logotipo de HR HealthCare e EZ-Protect son marcas comerciales de HR HealthCare.

© 2008, 2020, 2023-2025 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

LBL-0111-ES Rev. 0 (03/2025)